


Attends® Pull-Ons



Attends-numerointijärjestelmä kertoo imukyvyn

Attends Pull-Ons on sarja imukykyisiä ja joustavia inkohousuja, jotka voi pukea ja riisua tavallisten alushousujen tavoin. Attends Pull-Ons -inkohousut on suunniteltu keskivaikeasta vaikeaan inkontinenssiin ja/tai ulosteinkontinenssiin.

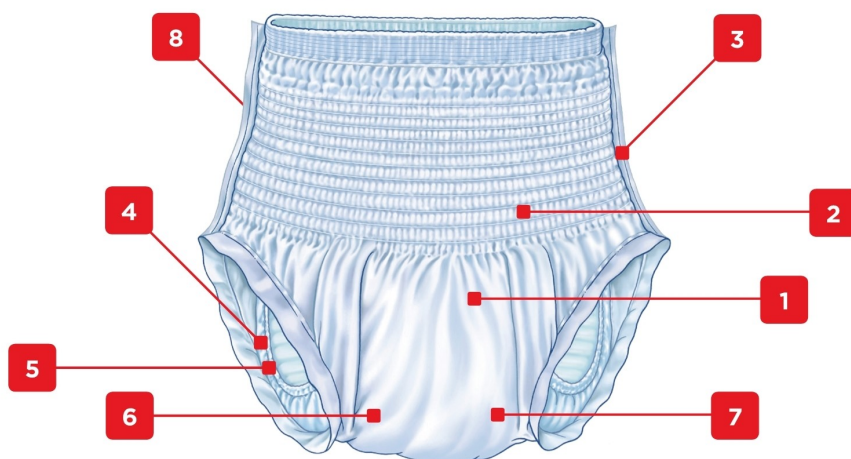

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1 Valkoinen tekstiilimäinen taustamateriaali lisää käyttömukavuutta ja huomaamattomuutta.</p> | <p>2 Leveä, elastinen vyötäröresori on hengittävä ja pehmeä. Resorin ansiosta vaippa muotoutuu anatomicisesti hyvin kehon ympärille.</p> | <p>3 Tarvittaessa inkohousut on helppo riisua sivuilta repäisemällä.</p> |
| <p>4 Lahkeensuiden joustoreunat antavat hyvän istuvuuden ja vähentävät ohivuotojen riskiä.</p> | <p>5 Erilliset vuotosuojat vähentävät tehokkaasti ohivuotojen riskiä.</p> | <p>6 Imuosan anatominen muotoilu parantaa käyttömukavuutta ja imuvarmuutta.</p> |
| <p>7 Imukykyä tehostava superabsorbentti vähentää ohivuotoja, toimii hajunestona ja lisää ihon kuivuutta.</p> | <p>8 Tuotteiden imukykykoko on painettu kosteusindikaattoriin tuotteiden tunnistamisen helpottamiseksi.</p> | |

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme

FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622

Attends® Pull-Ons



Pukemisohe

1



Valmistelut

Tarvittaessa voi mitata lantion- ja vyötärönympäryksen oikean koon varmistamiseksi.

2



Pukeminen

Attends Pull-Ons -inkohousuja voi käyttää tavallisten alusvaatteiden tavoin ja vaippaa voi pukea ja riisua uudelleen useita kertoja.

3



Istuvuus

Inkohousujen joustavuus antaa hyvän ja miellyttävän istuvuuden. Hengittävä materiaali on ihoystävällinen.

4



Riisuminen

Inkohousujen vaihtaminen ja riisuminen on helppoa. Vaipan voi joko vetää alas tai repiä sivut auki.

Neuvoja ja vinkkejä

Tuotevalikoima

- Tarvittaessa voi mitata lantion- ja vyötärönympäryksen oikean koon varmistamiseksi.
- Valitse tuotteen imukykytaso (3, 5 tai 8) virtsankarkailunasteen mukaan ja siirry suurempaan imukykyynumeroon tarvittaessa.
- Pull-Ons -inkohousut ovat hyvä vaihtoehto esim. omatoimisesti liikkuville hankiloille.

Pukeminen

- Varmista, että vaippa on puettu oikein päin.

Hävittäminen

- Rullaa vaippa ja käsittele toimipisteesi jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä laita vaippaa WC-pönttöön.



Attends Pull-Ons Medium, Large ja Extra Large -inkohousut on proDERM-testattu ja hyväksytty dermatologista tutkimusta tekevän instituutin toimesta.

Tuotteet kätevästi verkkokaupastamme

FYSNET.FI

www.fysnet.fi

info@fysnet.fi

045 137 4622